

1Day
リペア

SESファイバーシステム

SES MESH

Professional dental System

1

15minutes

義歯の補強修理を
15分で完結

2


Metal Free

金属補強を使わないため
見た目が美しく

3

Strong


なにも入れない場合の
3.6倍の強度

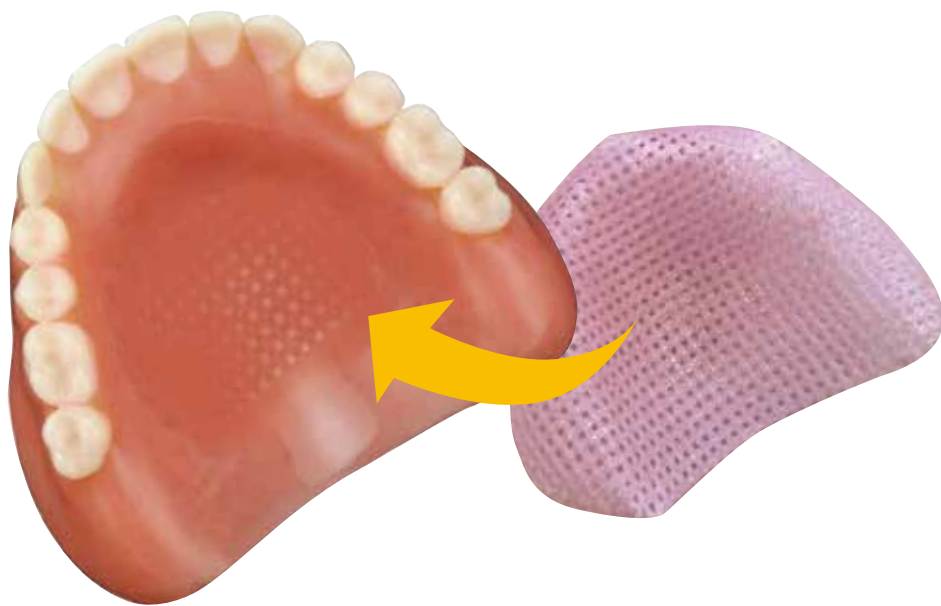

Metal



Metal Free

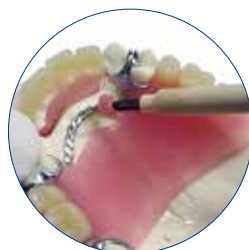

Metal




Metal Free



SESは光重合型レジンを含浸させたグラスファイバーにより
 アクリル樹脂と強固に接着し、義歯をしなやかに補強する
 新しい補強材です。

SESメッシュ

SESメッシュ拡大写真

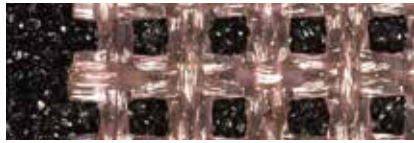

編みこまれたSESにレジンがしっかりと絡み、
 強固に補強します。編みこみの空間が、SES
 をしなやかに保ちます。


SESファイバーパーシャル SESファイバーリペアー

SESファイバーパーシャル・リペアー
 拡大写真




ミクロンのSESが束にな
 る事で棒状に硬化し、レ
 ジンを強固に補強します。


義歯圧縮破壊力(N)

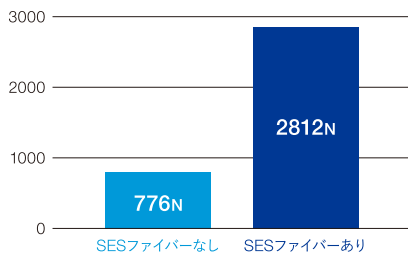

引張り破壊力(N)

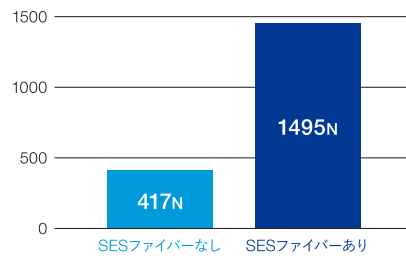


曲げ弾性率(MPa)

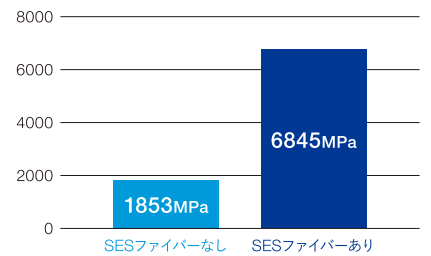

1Dayリペアの方法



光重合機で60秒照射し、SESを硬化させます。

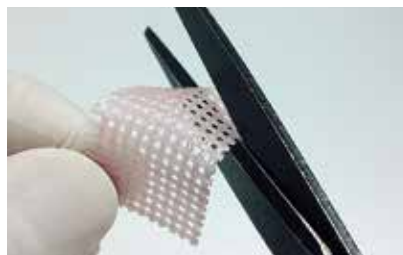

硬化したSESを切り取ります。



即時重合レジン等で義歯に取り込みます。

商品名	内容	価格	一般的名称	管理医療機器認証番号
SESメッシュ	3枚入り(90mm×70mm)	12,000円	義歯床補修用レジン	227AHBZX00032000
SESファイバーパーシャル	3本入り(150mm×幅7mm)	12,000円		
SESファイバーリペアー	3本入り(150mm×幅3mm)	5,200円		

お問合せは

西日本営業所
 TEL. 075-571-1000
 FAX. 075-572-9000

東日本営業所
 TEL. 03-3969-8000
 FAX. 03-3969-4567

九州営業所
 TEL. 092-710-5360
 FAX. 092-710-5361

製造販売元

製造販売業許可番号 26B2X10018



デンケン・ハイデンタル株式会社

http://www.kdf.co.jp/ Email denken@kdf.co.jp

エアウェルグループ