

JET OVEN クイックマニュアル

ここでは簡単に温度保持が行える定値運転と、設定時間経過後に運転を開始するオートスタート運転の使用方法を記載します。その他の操作方法は本器の取扱説明書をご覧ください。

定値運転のしかた

※定値運転とは設定した温度で永久保持を行う動作です。




1.電源を入れる

本器のブレーカを「入」にして電源を入れます。数秒間初期表示後、現在の温度と設定温度を表示します。

測定温度：現在の温度を表示


設定温度：前回設定した設定温度を表示

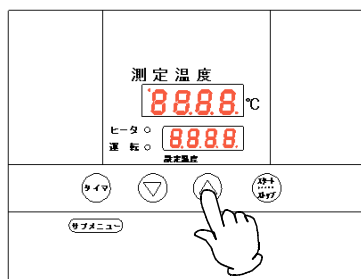

2.温度を設定する

▼▲キーを使って希望の温度に設定します。変更してから約 3 秒後に点滅が終了して値が設定されます。

運転中でも同様に変更ができます。

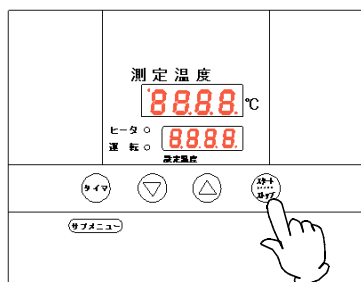


3.運転の開始、又は停止する

スタート/ストップキーを長押しします。停止中の状態であれば、「運転」ランプが点灯し運転が開始されます。運転中であればランプが消灯し運転が停止されます。

※運転状態は電源を切っても維持するように初期設定されていますので、運転中に電源を切ると再度電源を投入するだけで運転が開始されます。

オートスタート運転のしかた

※オートスタート運転とは、設定時間経過後に運転を開始する動作で、ご使用前に予め適切な温度にしたい場合に使用します。なお、運転開始後は定値運転になります。

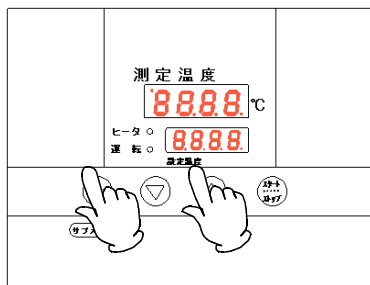

1. 定値運転同様に電源を入れる

2. 運転を解除する

運転中であれば「スタート/ストップ」キーを長押しして解除します。

3. 温度を設定する

定値運転同様に「▼▲」キーを使って希望の温度に設定します。

4. 運転開始時間を設定する

「タイマ」キーを2回押し、測定温度表示にオートスタート運転を表す「A S T R」を表示させます。同時に設定温度表示に設定時間が点滅表示されます。

「▼▲」キーで希望の時間に設定します。変更中は値が点滅表示し変更後、点滅が終了しますと確定されます。


5. タイマ動作を開始する

希望の時間を設定したら、測定温度表示にオートスタート運転を表す「A S T R」表示中に「スタート/ストップ」キーを長押しすると、運転ランプが点滅し、タイマ動作を開始します。

測定温度表示は設定時間表示から残時間表示に切り替わります。

6. タイマ動作を停止する

動作停止は再度「スタート/ストップ」キーを長押しします。

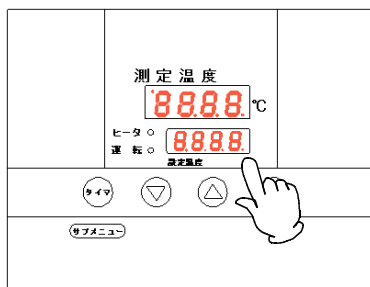

デンケン・ハイデンタル 株式会社

W1018000-0